

*Blood*STOP[®] iX

LA NUEVA GENERACION DE HEMOSTATICO QUIRURGICO





ATLAS SUPPLYMED, S.L

Pol. Industrial Silvota
C/ Peña Redonda, R19
33192 – Lugo de Llanera (Asturias)
Tlfo: 984 10 91 22
Fax: 984 28 48 88
info@atlassupplymed.es



LifeScience PLUS, Inc.

2520-A Wyandotte Street, Mountain View
CA 94306

BloodSTOP® iX

Rápido control del sangrado

Hemostático quirúrgico absorbible soluble en agua

- Celulosa oxidada regenerada eterizada
- Marcado CE Clase III aprobado para uso quirúrgico interno



BloodSTOP® iX es soluble en agua, bioreabsorbible, hemostático de celulosa regenerada oxidada y eterizada, biocompatible, libre de elementos de procedencia animal, hemostático que se asemeja a la gasa tradicional.

Las aplicaciones incluyen cirugía general, los procedimientos de otorrinolaringología, cirugía torácica, neurocirugía, ortopedia y muchos otros. Tiene certificado CE clase III para uso quirúrgico interno. Reúne todas las normas internacionales de biocompatibilidad y criterios para materiales de implante de uso prolongado. También Clase II aprobada por la CE para uso en heridas superficiales, es la elección perfecta para detener cualquier sangrado quirúrgico. No es otro producto ORC, *BloodSTOP iX* es celulosa oxidada regenerada eterizada.

Esta propiedad hace que sea soluble en agua al 100%, a diferencia de otros competidores que utilizan productos de celulosa regenerada.

¿Cómo funciona?

Cuando se aplica durante un procedimiento quirúrgico, *BloodSTOP® iX* absorbe rápidamente la sangre y exudados, se transforma en un gel que sella la herida con una capa protectora transparente, activamente ayuda a la coagulación de la sangre y crea un ambiente propicio para la curación de heridas. El gel transparente facilita la monitorización de la hemostasia.

BloodSTOP® iX Hemostático absorbible está indicado para en procedimientos quirúrgicos ayudar en el control de sangrado capilar, venoso, arterial y hemorragia pequeña. Se puede utilizar en neurocirugía, cirugía torácica, cirugía abdominal y gastrointestinal, cirugía plástica, tratamiento de quemaduras, cirugía oral maxilofacial, cirugía ENT, obstétrica y ginecológica, cirugía de colon rectal, la circuncisión, cirugía vascular, cardíaca, lesiones ulcerosas y otros cirugías generales.



- Celulosa natural
- Actúa en menos de un minuto
- Reabsorbe más rápidamente que otro hemostático
- Diseñado para el interior y heridas superficiales
- Fácil de usar
- Biocompatible
- Altamente absorbente, hidrófilo
- Ningún material de origen animal
- Embalaje estéril de un solo uso; varios tamaños
- Rentable
- Biodegradable

BloodSTOP® iX

Rápido control del sangrado

Para uso en procedimientos de Cath Lab / Radiología Intervencionista, en combinación con la presión directa

BloodSTOP® iX controla rápidamente el sangrado superficial comúnmente asociado con:


- Acceso injerto de diálisis
- Fístula procedimientos de injerto de limpieza
- Limpieza trombosis venosa profunda
- Biopsia
- Colocación de puertos venosos
- Colocación líneas PICC
- Procedimientos de colocación de stent
- Procedimientos de acceso arterial (radial y fe moral)
- Colocación y eliminación del catéter de diálisis
- Procedimientos de toma de muestras de tejidos
- Angiograma perfusión y estudio
- Colocación filtro de vena cava
- Extracción de cuerpos extraños
- Corta-bajadas procedimientos de acceso
- Injertos arteriales, venosos y fístula



Radiología intervencionista


BloodSTOP® iX

Rápido control del sangrado

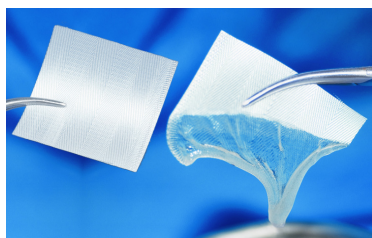

"He utilizado BloodSTOP iX® en cirugía dental y extracciones donde el control del sangrado fue difícil. Cuesta menos de la mitad del precio de otros productos ... y se disuelve totalmente en el agua, así que no tiene que preocuparse de un cuerpo extraño que se deja en el área quirúrgica. He tenido una tasa de éxito del 100% con BloodSTOP® iX en más de cinco años de uso con cientos de pacientes".

Dr. Kenneth Robinson, D.M.D., PC

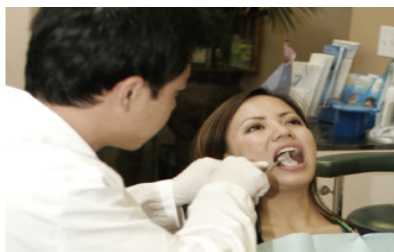

BloodSTOP iX es la elección correcta para el control del sangrado en Odontología y Cirugía Oral

BloodSTOP® iX Hemostático absorbente es ideal para controlar el sangrado significativo asociado con extracciones dentales y otros procedimientos intra-oral y extra-orales. BloodSTOP® iX es seguro, fácil de usar y de pH neutro. Se ajusta a los variados espacios y superficies de la cavidad y vía oral, proporcionando rápida acción de control de la hemorragia.

BloodSTOP® iX es celulosa regenerada oxidada natural biocompatible un eterizado. Esta matriz hemostática absorbe rápidamente la sangre y se transforma en un gel para sellar la herida con una capa protectora, se une y activa las plaquetas, provee apoyo a la formación de coágulos y crea un ambiente favorable para la cicatrización de heridas.

Usos

- Extracciones
- Cirugía Oral: biopsia, heridas quirúrgicas periodontales
- Cualquier otro procedimiento que causan sangrado

Beneficios

- Actúa en menos de un minuto
- se inserta fácilmente en espacios apretados
- Inodoro, insípido
- pH neutro, sin sodio añadido
- Soluble en agua para facilitar su extracción por irrigación
- Ningún material de origen animal
- Biocompatible
- Paquete estéril, uso individual
- Económico
- Seguro para todo público

"La capacidad para controlar el sangrado rápidamente y eficazmente en la cavidad oral es de gran preocupación para todos los que realizan pequeños y grandes procedimientos quirúrgicos intra-orales, tanto los cirujanos orales como médicos generales. BloodSTOP® iX para detener el sangrado funciona en una fracción de tiempo mucho mas rápido que el requerido por la tradicional gasa de algodón y presión. No tiene olor ni sabor, fácil de aplicar, y aún más fácil de eliminar, se lava con agua o solución salina". Dr. George Freedman, DDS

BloodSTOP® iX

PRESENTACION DEL PRODUCTO

DESCRIPCION PRODUCTO	UDS/CAJA	CODIGO - REFERENCIA
BloodSTOP Hemostat iX 1,3 x 5 cm	24	BSiX 27
BloodSTOP Hemostat iX 5 x 5 cm	12	BSiX 14
BloodSTOP Hemostat iX 5 x 10 cm	12	BSiX 15
BloodSTOP Hemostat iX 10 x 20 cm	12	BSiX 17
BloodSTOP Hemostat iX 5 x 35 cm	12	BSiX 20