

1

Para episodios de epistaxis,
solo hay **una** respuesta correcta:
RAPID RHINO de Smith & Nephew.

Dispositivo de epistaxis inflable RAPID RHINO




Características


- Sencillo de insertar y retirar
- Se adapta rápidamente a la anatomía nasal
- Proporciona una compresión suave y uniforme a las zonas de epistaxis
- Diseñado para prevenir la adherencia al tejido o a los coágulos de sangre durante su retirada

Modo de empleo de RAPID RHINO


- 1 Retire la funda protectora azul. Sumerja el dispositivo en agua estéril durante 30 segundos COMPLETOS.

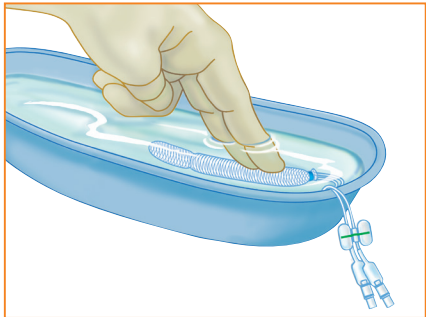


- 2 Inserte el dispositivo a lo largo de la cara superior del paladar duro hasta que el indicador azul se introduzca en la fosa nasal.

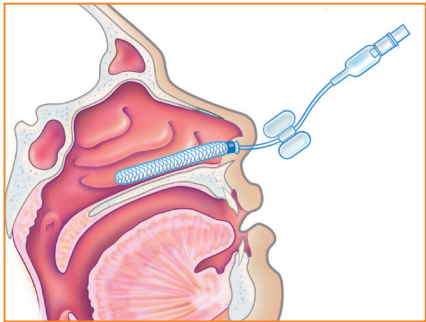


- 3 Con una jeringa de 20 ml, infle el dispositivo Rapid Rhino solo con AIRE. Supervise el manguito piloto para ver la sensación táctil directa; detenga el inflado cuando el manguito piloto se ponga redondo y presente firmeza al apretarlo.

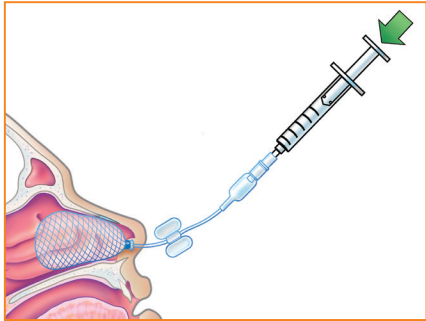


- 4 Infle el manguito para proporcionar un taponamiento suave y de baja presión, llevando la tela de CMC directamente a la zona de la hemorragia.

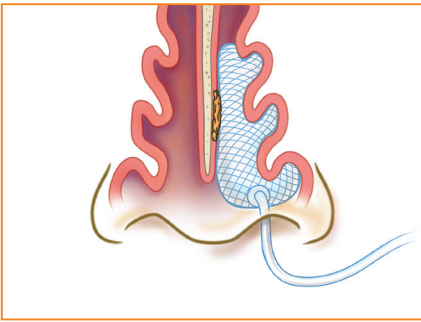


- 5 Reevalúe al cabo de 15-20 minutos; vuelva a inflar para asegurar la presión correcta (en caso necesario) y sujete el dispositivo con esparadrapo a la mejilla del paciente, alejado del labio superior.

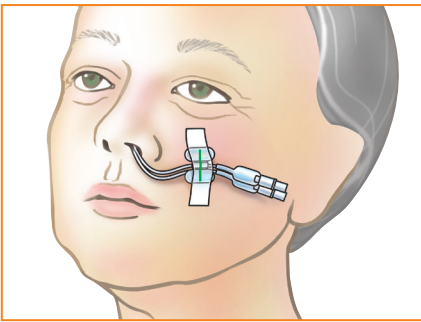

- 6 Deberá retirarse entre 24 y 72 horas después del tratamiento.

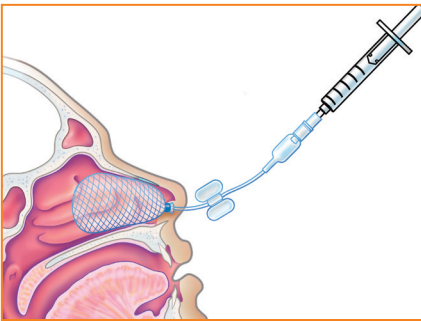

Pasos específicos para el modelo anterior-posterior RR900

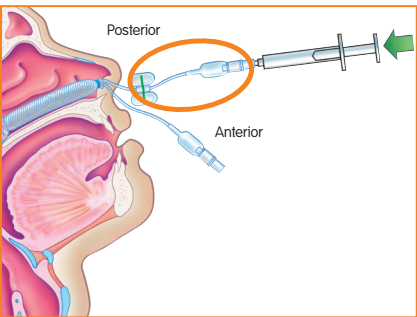

- 1 Infle primero el balón posterior. El balón posterior está indicado por el indicador con la línea verde.
- 2 Cuando haya suficiente presión, retire la jeringa y tire con suavidad del dispositivo en sentido anterior.
- 3 Infle el segundo balón, anterior, como un Rapid Rhino normal.



Modelos unilaterales

Inflable sin vías aéreas	
Tamaño	Modelo
4,5 cm	RR450
5,5 cm	RR550
7,5 cm	RR750
9,0 cm	RR900

Inflable con vías aéreas	
Tamaño	Modelo
5,5 cm	RR551
7,5 cm	RR751

Modelos bilaterales

Inflable sin vías aéreas	
Tamaño	Modelo
5,5 cm	RR552
7,5 cm	RR752

Inflable con vías aéreas	
Tamaño	Modelo
5,5 cm	RR555
7,5 cm	RR755



Consulte las instrucciones de uso incluidas con el producto para ver una lista completa de advertencias, precauciones y contraindicaciones.

Más de 150 años ayudando a los profesionales sanitarios